



SARS-CoV-2 Antigen Test Kit

TEST RAPIDO ANTIGENICO MONOUSO

PRESENTAZIONE DESCRITTIVA - TECNICA - LOGISTICA

SARS-CoV-2 KIT

TEST RAPIDO ANTIGENICO CERTIFICATO CE 1434



*Dispositivo medico diagnostico in vitro
Registrato presso Ministero della Salute n. 2188888*

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit

TEST RAPIDO ANTIGENICO MONOUSO

Contenuto della confezione



CARD TESTER


PROVETTA CON DOSATORE



TAMPONE STERILE




DILUENTE CAMPIONE

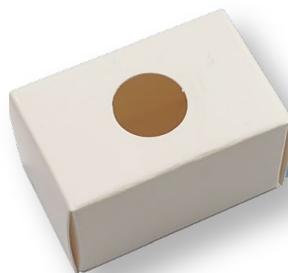

SUPPORTO PROVETTA

SACCHETTO PER CAMPIONI
A RISCHIO BIOLOGICO

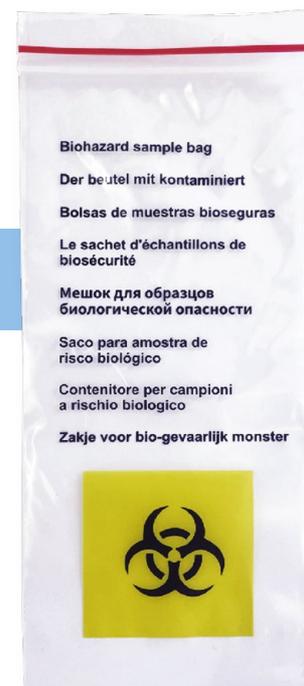

MANUALE D'USO



SARS-CoV-2 KIT

TEST RAPIDO ANTIGENICO

MM
MUNUS MEDICAL

Destinazione d'uso

Questo kit di test rapido è utilizzato per il rilevamento qualitativo dell'antigene della proteina nucleocapside da SARS-CoV-2

Tempo del risultato del test

15 Minuti

Tipo di campione

Kit approvato per il prelievamento di campioni attraverso il dotto nasale anteriore

Certificato da organismo notificato 1434



Caratteristiche del prodotto

- ◆ Risultati in 15 minuti
- ◆ Semplice da usare
- ◆ Risultati semplici da leggere
- ◆ Sicuro e affidabile
- ◆ Conservabile fra i 2° e i 30°
- ◆ Elevata sensibilità e specificità
- ◆ Tamponi sterili

PRECISIONE DIAGNOSTICA

| | | |
|---------------------------------|-------------|-------|
| COVID-19 Test Rapido Antigenico | Sensibilità | 98,5% |
| | Specificità | 100% |

SPECIFICHE GAMMA PRODOTTI

| Nome | Codice | Quantità | Formato |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| COVID-19 Test Rapido Antigenico | LX-401302 | 1Test/Kit | mm 17x73x200 |

[LINK SCARICA CERTIFICATO TAMPONE STERILE](#)

[LINK SCARICA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'](#)

[LINK SCARICA CERTIFICATO TEST KIT](#)

[LINK SCARICA MANUALE D'USO](#)

[LINK SCARICA REPORT STUDIO CLINICO GERMANIA](#)

[LINK SCARICA REPORT STUDIO CLINICO POLONIA](#)

Modo d'uso


MM
MUNUS MEDICAL

1



- ◆ Aprire la soluzione d'estrazione
- ◆ Versare l'intero contenuto nella provetta.
- ◆ Poggiare la provetta nel porta provette in cartone.

2

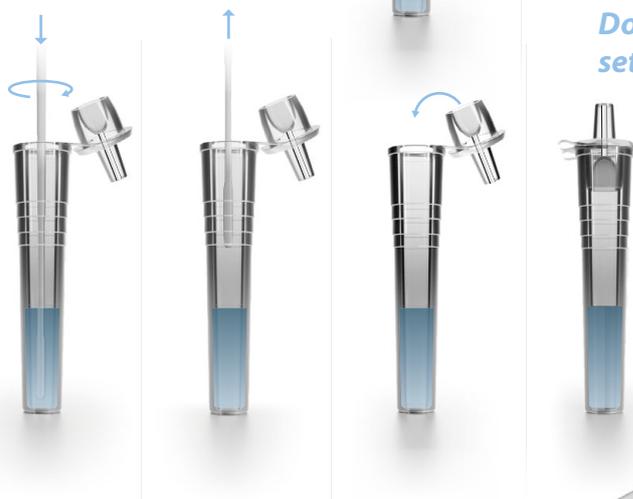

Dopo aver inserito il tampone 1,5~2 cm nel setto nasale attraverso entrambe le narici

- ◆ Inserire il tampone nella provetta contenente la soluzione di estrazione e mescolare bene.
- ◆ Togliere il tampone.
- ◆ Chiudere la provetta.

3



- ◆ Aggiungere **3 gocce piene** della soluzione miscelata verticalmente nel pozzetto (S) del tester.
- ◆ Leggere il risultato sul tester, lasciato orizzontale su un piano, 15~20 minuti dopo l'aggiunta del campione.
- ◆ Risultati ottenuti dopo 20 minuti non sono validi.

Risultati del test



Positivo (+)



Negativo (-)



Non valido



Non valido



MUNUS MEDICAL
è una divisione di
Munus International srl
via della Valtiera, 233
06135 Perugia

Tel. 0039 075 394045
www.munusmedical.it
www.munusinternational.it
info@munusmedical.it