

GRUPPO GDA

www.gruppogda.it

SCHEDA TECNICA Art. GDA MASK P2

Produttore: **GDA SRL - VIA LECCE, 87 - 73013 Galatina (LE) Italia**
MASCHERA FFP2 NR SENZA VALVOLA
MODELLO "GDA MASK P2":

DESCRIZIONE: Semi maschera filtrante protettiva a 5 strati, ripiegata e senza valvola, morbida e confortevole, con trattamento esterno anti droplet, anti PM 2.5, priva di odore.

Dispositivo **certificato CE** da Ente notificato EUROPEO, MTIC INTERCERT (NB no. 0068), conforme al Regolamento Europeo (UE) 2016/425 SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE e classificata come DPI di III categoria. Protegge da polveri, aerosol / droplets solidi e liquidi non tossici, di bassa media tossicità e altamente tossici in concentrazione fino a 10 volte il TLV per polveri secondo la norma EN 149:2001+A1:2009 SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

GARANZIA : 3 ANNI .

COMPOSIZIONE:

No.	materiali	specifiche
1	Primo strato Esterno : spunbond	50 gr/m2
2	Secondo e terzo strato interno: meltblown	25 gr/m2
3	Quarto strato interno: cotone "hot air"	50 gr/m2
4	Quinto strato (a diretto contatto con la bocca): spunbond	30 gr/m2
5	Elastici 5 mm latex free	
6	Nasello 5 mm con doppio filo metallico e plastica	

SETTORE DI UTILIZZO:

Le maschere FFP2 sono indicate in ambienti professionali ed industriali

MODALITA' DI CONSERVAZIONE:

conservati nella confezione originaria, i respiratori hanno una durata di 3 anni, la data di scadenza è riportata sull'imballo. Prima dell'uso controllare che il prodotto sia ancora all'interno del periodo di validità dichiarato (data di scadenza). Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e al riparo dai raggi solari.

ISTRUZIONI D'USO:

1. Lavarsi le mani prima di aprire la confezione. Aprire la maschera e tirare gli elastici.
2. Appoggiare la mascherina sul viso coprendo mento e naso. Adattare gli elastici dietro alle orecchie e controllare che sia ben ferma
3. Adattare lo stringinaso al naso. Verificare che la mascherina aderisca bene al viso su tutti i lati :

- per verificare l'aderenza, appoggiare entrambe le mani sulla mascherina e inspirare energicamente; si dovrà percepire una pressione negativa
 - se l'aria entra da altri margini della mascherina, verificare l'aderenza, sistemare ogni lato e fissare meglio i laccetti
4. Cambiare mascherina immediatamente se non si riesce a respirare o se la maschera si danneggia . Lavarsi le mani per rimuovere la maschera . Per rimuovere la maschera , togli gli elastici dalle orecchie . Non toccare la maschera mentre la usi.
 5. La maschera va sostituita immediatamente in caso si bagni o si danneggi . La maschera è monouso . Non riutilizzare la maschera facciale.

AVVERTENZE E RESTRIZIONI D'USO:

- La presenza di barba sul viso può ridurre l'efficacia del dispositivo.
- Leggere le istruzioni prima dell'uso.
- Controllare la maschera prima di entrare nell'area di utilizzo . deve esserci almeno il 19.5% di ossigeno nell'area di utilizzo altrimenti la maschera non può essere usata.
- La maschera non protegge da Gas o vapori.
- Sostituire la maschera se si percepisce una maggiore resistenza all'aria.
- In caso di infiltrazione ripetere le procedure 1,2,3,4 delle istruzioni d'uso.
- Non usare la maschera se la confezione è danneggiata.



foto laterale

IMBALLAGGIO:

- confezionate in bustine singole da 1 pezzo
- scatola piccola –da 50 pezzi